



PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM


Un sistema inmunológico sano comenzará a formar anticuerpos poco después de la exposición al virus SARS-CoV-2. Esta prueba de oro coloidal de flujo lateral en casete detectará la presencia de anticuerpos en una gota de sangre del paciente en 15 minutos. Si bien no se ha demostrado que la presencia de anticuerpos confiera inmunidad, pero es probable dado el comportamiento de otros coronavirus en humanos.

Línea de control

Línea IgG

Línea IgM

Muestra

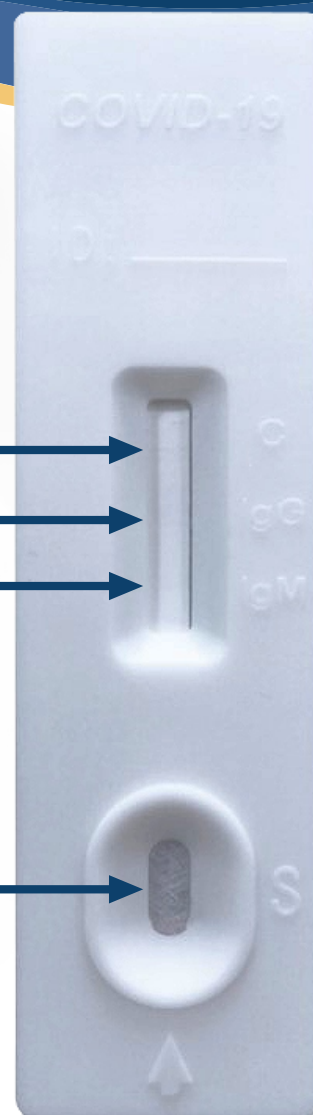

RESULTADOS RÁPIDOS

Indica resultado positivo o negativo en máximo 15 minutos.



TIPO DE MUESTRAS

Funciona con punción digital, sangre entera, suero o muestra de plasma.



ESPECIFICACIONES

Sensibilidad clínica: 93.3%
Especificidad: 100%
Precisión: 97.9%


25

CONTENIDO DE KIT POR CAJA

Contiene 25 casetes, 1 tubo de tampón de 5 ml y 25 pipetas. No incluye lancetas.


Soluciones para el cuidado de la salud.

Tecnología de calidad, diseño y producción de instrumentos médicos

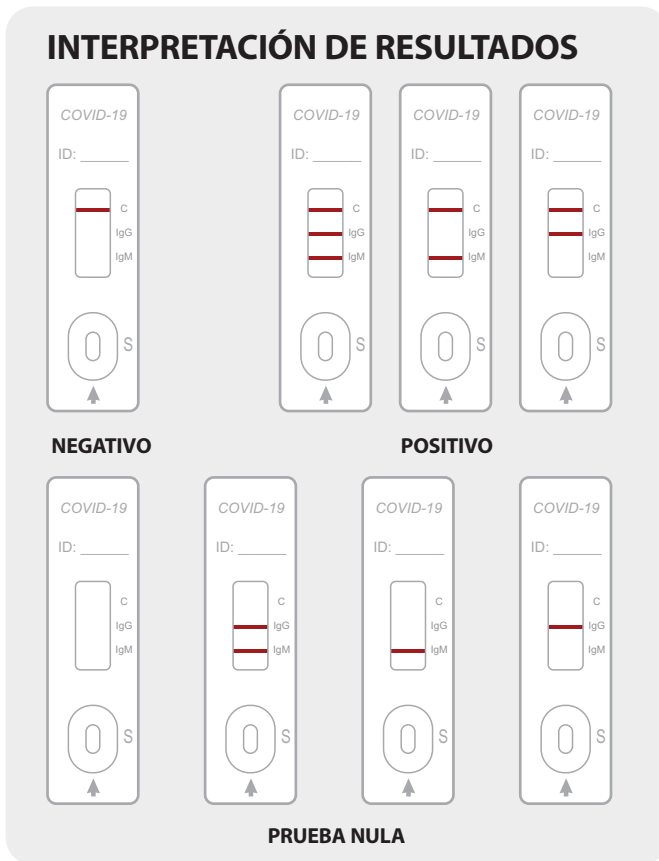

Punción digital/Sangre entera Procedimiento de prueba

1. Personal y material apropiado
2. Recoger 10 ul de sangre entera
3. Coloque 2-3 gotas del tampón
4. Esperar máximo 15 minutos
5. Lectura de resultados
6. Desechar material biológico

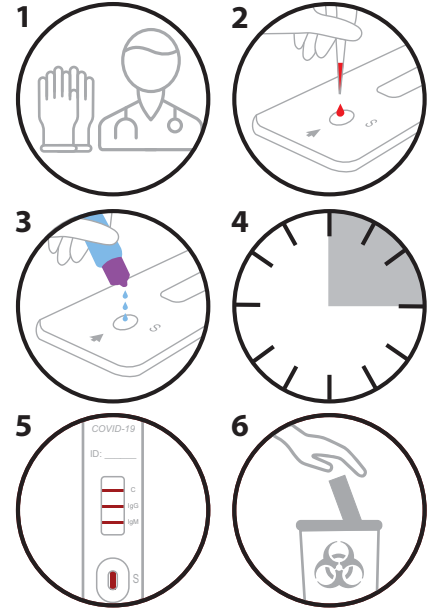

NOTAS


En este dispositivo, cualquier línea, por débil que sea, se considera una línea. No compare la intensidad de la línea de prueba con la línea de control. No aprobado por la FDA. Autorizado bajo la HHS Coronavirus Medical Emergency, Autorización de uso de emergencia de la FDA. Solo para uso profesional médico. Los resultados negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2, particularmente para aquellos recientemente infectados. Usar junto con el diagnóstico clínico y la prueba de PCR molecular.

Conoce nuestros productos **marca Loh Medical**



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Nuestra línea abarca desde sillas de ruedas, Scooters de movilidad y sillones elevables. Pregunta a tu representante local.

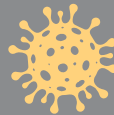

COMBATE AL COVID-19

Recuerde lavarse las manos a menudo, use una mascarilla, distanciamiento social y verificar su temperatura.

Más información en [cdc.gov](https://www.cdc.gov)

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

